



# ***EVACU B***

## *Manual de instrucciones*



1. Retire la cubierta, jale hacia abajo la correa de velcro y levante la silla EVACU B del soporte de pared.
2. Para desenganchar la oruga de goma, sostenga la manija y levante un poco la EVACU B. Ahora, sacuda rápidamente hacia abajo para hacer que la oruga de goma descienda. Escuchará un sonido cuando la oruga de goma se engancha en su posición.
3. Presione hacia abajo la manija y mueva la EVACU B para asegurarse de que la oruga de goma está correctamente asegurada.
4. Coloque a cada bebé en los bolsillos individuales, metiéndolos por los pies. Ajuste cada uno de los reposacabezas en cada uno de los bebés.
5. Una vez que todas las hileras de bolsillos han sido ocupadas, ciña el cinturón de seguridad alrededor de los bolsillos, de manera que los bebés estén seguros y se mantengan firmemente en su lugar.
6. Coloque la correa negra de nylon en la muñeca de su mano izquierda, suelte el freno jalando hacia arriba la barra roja y sosteniéndola en esa posición. \*Nota: Se debe mantener el freno suelto todo el tiempo que se esté moviendo la silla EVACU B.
7. Levante la EVACU B de tal manera que solo las dos ruedas del frente toquen el piso y avance hacia las escaleras.
8. Aproxímese al inicio de las escaleras con la velocidad suficiente para empujar la EVACU B unas 12 pulgadas (30 centímetros) más allá de la orilla, en ese momento, la parte delantera de EVACU B se inclinará hacia el frente para que la oruga de goma quede paralela a las escaleras.
9. Descienda las escaleras mientras sigue sujetando la barra roja. \*Nota: Si surge la necesidad de detenerse durante el descenso, suelte la barra roja para enganchar el freno y la EVACU B permanecerá detenida de manera independiente en las escaleras.
10. Diríjase a un lugar seguro.
11. Para volver a colocar EVACU B en su soporte: Enganche la manija en el soporte de pared con el lado de la oruga de goma viendo hacia usted. Presione simultáneamente los DOS BOTONES DE CROMO que se encuentran en la barra telescópica negra. Con su rodilla presionando la barra transversal, empuje el mecanismo de la oruga de goma hacia adelante.
12. Asegure la oruga de goma con la correa de velcro y cubra la EVACU B con su cubierta para el polvo.

21 de septiembre de 2016